

Ideal Bandages

Description générale du produit/utilisation prévue

Les bandages Ideal sont des dispositifs médicaux non stériles, utilisés sur une peau intacte dans un environnement clinique et à domicile pour la fixation de pansements primaires et secondaires, d'attelles et de plâtres (et dispositifs médicaux similaires) en particulier sur les articulations. De plus, ils sont utilisés pour la stabilisation des muscles, des tendons, des ligaments et des articulations à faible effet d'immobilisation ainsi que pour une légère compression en cas de maladies ou de blessures du système musculo-squelettique (telles que des entorses et foulures) ou d'hématomes. Les bandages Ideal fonctionnent particulièrement bien sur les articulations et les parties du corps arrondies et coniques, dans les interventions médicales lorsque des plaies aiguës et chroniques doivent être traitées à long terme ou lorsqu'une légère immobilisation est nécessaire en combinaison avec des dispositifs médicaux. La bandage Ideal est une bandage à tissage large, 100 % coton. Ce produit est disponible en différentes largeurs et longueurs. Les bandages Ideal sont non adhésives et d'extensibilité moyenne. Les bandages Ideal sont à usage unique exclusivement. Les bandages Ideal sont des dispositifs médicaux de classe I.

Application/indication

Les bandages Ideal sont dotées d'un potentiel élevé de fixation des pansements primaires et secondaires, des plâtres et attelles et des plâtres orthopédiques, plus spécifiquement au niveau des articulations. Après application pour fixation, l'élasticité du produit garantit la liberté de mouvement des membres. La structuré tissée des bandages Ideal leur confère une certaine rigidité et la possibilité d'exercer une certaine pression après application. Par conséquent, les bandages Ideal conviennent à l'application d'une légère compression et aux fonctions de soutien et de soulagement.

Numéros de référence

RÉF	Nom	Taille	Nr. bandage/boîte pliante	Emballage individuel
931011	Idealbinde	4 cm x 5 m	n.a.	Oui
931012	Idealbinde	6 cm x 5 m	n.a.	Oui
931013	Idealbinde	8 cm x 5 m	n.a.	Oui
931014	Idealbinde	10 cm x 5 m	n.a.	Oui
931015	Idealbinde	12 cm x 5 m	n.a.	Oui
931016	Idealbinde	15 cm x 5 m	n.a.	Oui
931017	Idealbinde	20 cm x 5 m	n.a.	Oui
931018	Idealbinde	30 cm x 5 m	n.a.	Oui
931754	Idealbinde	12 cm x 5 m	10	Non
931755	Idealbinde	6 cm x 5 m	10	Oui
931756	Idealbinde	8 cm x 5 m	10	Oui
931757	Idealbinde	10 cm x 5 m	10	Oui
931758	Idealbinde	12 cm x 5 m	10	Oui
931759	Idealbinde	15 cm x 5 m	n.a.	Oui
931760	Idealbinde	20 cm x 5 m	n.a.	Oui
931761	Idealbinde	30 cm x 5 m	n.a.	Oui
931859	Idealbinde	4 cm x 5 m	10	Non
931860	Idealbinde	6 cm x 5 m	10	Non
931861	Idealbinde	8 cm x 5 m	10	Non

Ideal Bandages

931862	Idealbinde	10 cm x 5 m	10	Non
931863	Idealbinde	15 cm x 5 m	10	Non
931865	Idealbinde	20 cm x 5 m	10	Non
931866	Idealbinde	30 cm x 5 m	10	Non

Numéros de référence dans le catalogue de vente

RÉF	Nom	Taille	Langues sur le conditionnement	Nr. bandage/boîte pliante	Emballage individuel
332067	Nature Care Coton Fixation Bandage	6 cm x 5 m	LG 1 : DE, FR, NL, IT	1	Non
332068	Nature Care Coton Fixation Bandage	6 cm x 5 m	LG 2 : ES, PL, HU, RO	1	Non
332086	Nature Care Coton Fixation Bandage	6 cm x 5 m	LG 3 : CZ, SK, HR, SL	1	Non

Risques résiduels

Inconnus.

Dispositif à usage unique

La réutilisation d'un dispositif médical à usage unique est dangereuse. Le retraitement des dispositifs en vue de leur réutilisation peut gravement nuire à leur intégrité et à leurs performances. Informations disponibles sur demande.

Élimination du produit

Afin de minimiser le risque d'infections potentielles ou de pollution environnementale, les composants jetables de Ideal bandages doivent être mis au rebut conformément aux procédures d'élimination stipulées dans les lois, règlements, réglementations et normes de préventions des infections locales et en vigueur.

Déclaration d'incident

Pour un patient/utilisateur/tiers situé dans l'Union européenne ou dans des pays disposant de réglementations identiques (Règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux) ; si, au cours de l'utilisation de ce dispositif ou en conséquence de son utilisation, un incident grave est survenu, veuillez déclarer celui-ci au fabricant et/ou son représentant autorisé, ainsi qu'à l'autorité de votre pays.

Caractéristiques de performance du produit


propriété	valeur
allongement	100 %
longueur à l'extension	500 cm
largeur	4 cm ; 6 cm ; 8 cm ; 10 cm ; 12 cm ; 15 cm ; 20 cm ; 30 cm
Grammage (étiré)	env. 138 g/m ²

Ideal Bandages

Étiquetage

N° de lot avec code à 9 caractères


p. ex. :

	9	999	01	00	1
explication	[9 = 2019]	[999-000]			
définition	année	numéro de série de production	à des fins d'utilisation en interne uniquement		

Date de fabrication

p. ex. :		2015	04	01
		année	mois	jour

Date de péremption

p. ex. :		2020	04	01
		année	mois	jour

Durée de conservation : 5 ans

Dispositif médical



Identificateur d'appareil unique



Marque CE




Ne pas réutiliser



Maintenir au sec



Ne pas couper

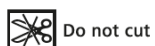

Fiche technique

Ideal Bandages

Date de révision du texte : 17/08/2022