


# HYALO<sup>4</sup>

## Silverspray

AIDE À LA CICATRISATION DES PLAIES ET  
PROTÈGE CONTRE LA CONTAMINATION  
MICROBIENNE.



Ce produit est un dispositif médical (CE0051)

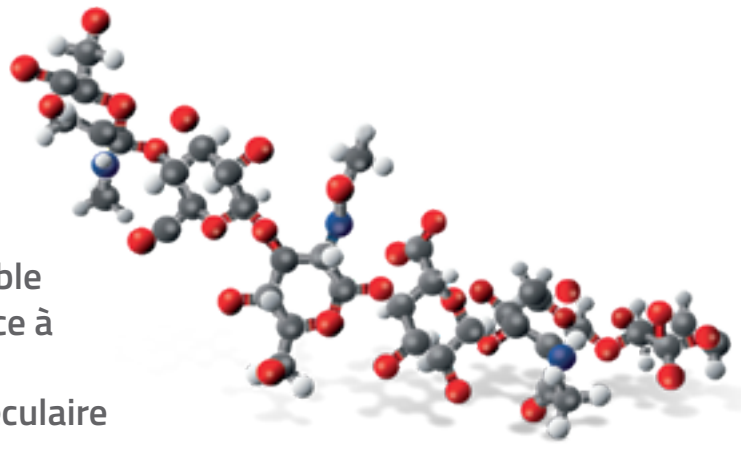


## ACIDE HYALURONIQUE

- Crée un environnement humide favorable à la réparation optimale des tissus grâce à sa grande capacité de rétention d'eau<sup>1</sup>
- L'acide hyaluronique de bas poids moléculaire améliore l'auto-défense de la peau<sup>2</sup>
- Soutient le renouvellement du tissu épithélial et des vaisseaux sanguins<sup>3</sup>

## ARGENT MÉTALLIQUE<sup>1</sup>


Incorporé dans la matrice créée par le kaolin et l'acide hyaluronique, il permet à la barrière formée d'être résistante aux agents microbiens.

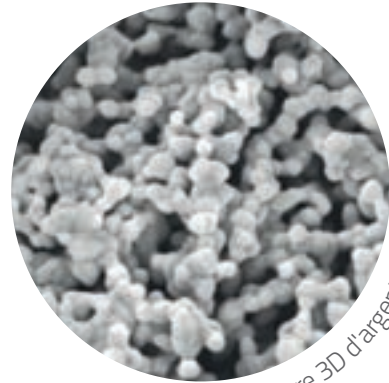

Microstructure 3D d'argent métallique

## VITAMINE E<sup>4</sup>

Grâce à son action antioxydante et filmogène, elle soutient l'activité hydratante de l'acide hyaluronique, aidant ainsi le processus de régénération cutanée.

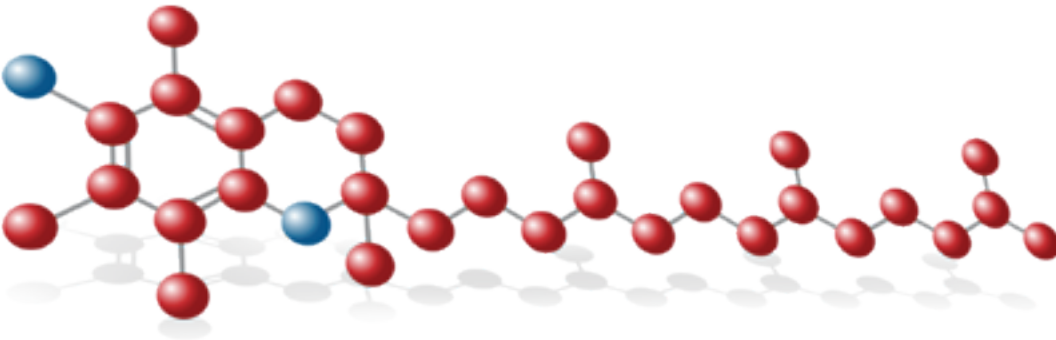

## KAOLIN ET AMIDON

L'acide hyaluronique et l'argent sont combinés dans une matrice (kaolin et amidon) dotée de propriétés absorbantes. L'absorption de l'exsudat contribue au processus naturel de régénération des tissus, permettant, avec l'acide hyaluronique et l'argent, la formation d'une barrière protectrice contre la contamination microbienne.

## Indications

- Traitement de lésions cutanées non infectées, des pieds diabétiques, des pieds d'athlète et des escarres.



## Composition

- Sel sodique d'acide hyaluronique à 0,25 %
- Ag (Argent métallique)
- Vitamine E
- Autres: kaolin, amidon de maïs, huile de son de riz, terpinéol, disiloxane en gaz propulseur

## Caractéristiques

Taille de l'emballage	Code CNK	Prix public
Spray 50 ml	4323-440	€ 13,25
Spray 125 ml	4323-457	€ 19,45


## Avantages de la nouvelle formulation

- La suspension de poudre pulvérisée adhère au lit de la plaie sans dispersion créant une barrière protectrice contre les bactéries.
- Atténue l'effet de froid (dû au gaz propulseur) lors de l'application.
- Absorbe les exsudats.

### Instructions d'utilisation

#### PHOTO 1:

Nettoyez les lésions avec p.e. une solution physiologique.

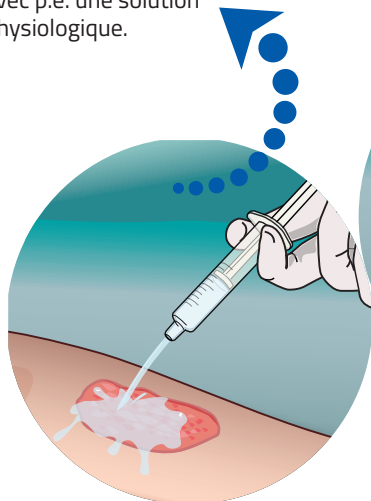


#### PHOTO 2:

Secouez vigoureusement le flacon pendant quelques secondes avant utilisation.




#### PHOTO 3:

Tenez le flacon en position verticale et pulvérisez, à une distance d'environ 15 cm, une quantité suffisante de poudre pour recouvrir la région à traiter.

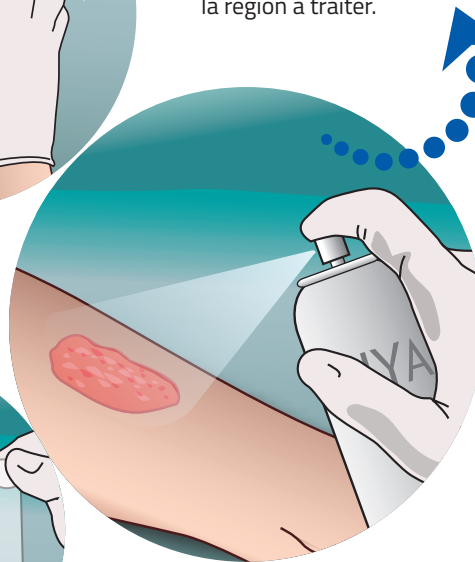


#### PHOTO 4:

Nous recommandons de couvrir la zone traitée d'une gaze stérile.

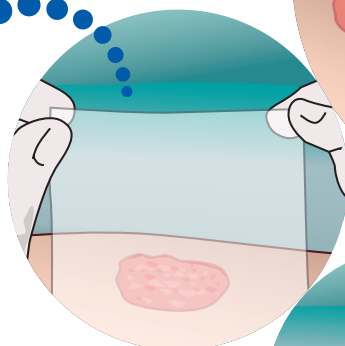

#### PHOTO 5:

Appliquez un bandage. Appliquez le Hyalo<sup>4</sup> Silver Spray une ou deux fois par jour, selon la gravité de la plaie.

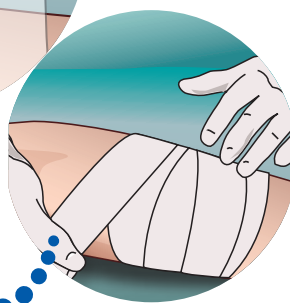

- Le produit peut être enlevé facilement par le nettoyage de la lésion à l'aide d'une solution saline physiologique.

1. Hyalo4 Silverspray. Instructions d'utilisations. Data on file.

2. Gariboldi S, et al. (2008). Low molecular weight hyaluronic acid increases the self-defence of skin epitelium by induction of  $\beta$ -Defensin2 via TLR2 and TLR4. *J Immunol*, 181, 2103-2110.

3. Prosdocimi M., & Bevilacqua C. (2012) Exogenous hyaluronic acid and wound healing: an updated vision. *Panminerva Med* 54 (2), 129-135.

4. Shahrim Z, et al. (2016). Palm Tocotrienol: A Good Antioxidant for Skin Wound Healing. *Palm Oil Developments* 64, 14-19.

Date de la dernière mise à jour: 07/2021