


Registreer uw meter voor  
hulp en ondersteuning:  
[OneTouch.be/welkom](http://OneTouch.be/welkom)



## Verkorte handleiding OneTouch Select Plus Flex® Bloedglucosesysteem

Gebruik deze verkorte handleiding om vertrouwd te raken met uw meter en volg de hierin beschreven stappen om van start te gaan.

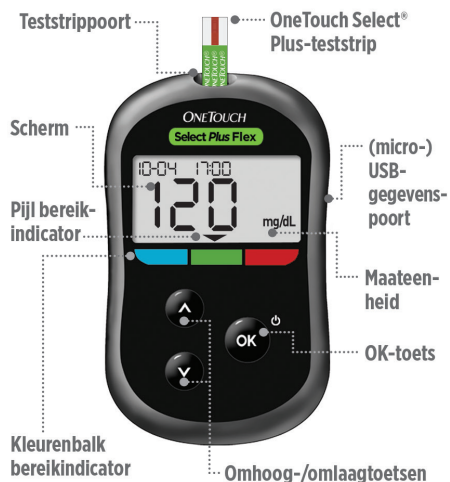

**⚠ BELANGRIJK:** Lees de gebruikershandleiding die bij uw systeem is geleverd.



AW 07305201A

**ONETOUCH®**

**1**

### Stel de tijd en datum op de meter in

Zet de meter aan

Houd **OK** ingedrukt tot het opstartscherm verschijnt.


Gebruik de knoppen en om elke instelling aan te passen en druk op **OK** om te bevestigen.



**Stel de tijd in** op het eerste SET-scherm

> **Het uur** knippert. Druk op **OK** als dit juist is, of wijzig de waarde en bevestig de instelling.

> **De minuten** knipperen. Druk op **OK** als dit juist is, of wijzig de waarde en bevestig de instelling.

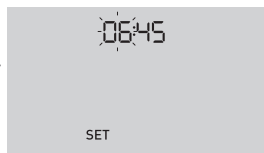


**Stel de datum in** op het volgende SET-scherm

> **Het jaar** knippert. Druk op **OK** als dit juist is, of wijzig de waarde en bevestig de instelling.

> **De maand** knippert. Druk op **OK** als dit juist is, of wijzig de waarde en bevestig de instelling.

> **De dag** knippert. Druk op **OK** als dit juist is, of wijzig de waarde en bevestig de instelling.

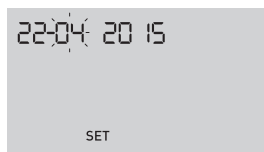

**U bent nu klaar om te gaan meten**

U bent klaar met het instellen van de meter wanneer het scherm met 3 streepjes wordt weergegeven.



**2**

### Voer een test uit

#### Contactstaafjes




#### Teststrippoort




Er verschijnt een knipperende bloeddruppel.

Schuif een teststrip in de teststrippoort met de contactstaafjes naar u toe gericht.

#### Smal kanaaltje

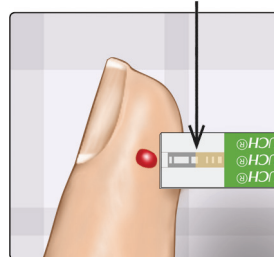

#### Bevestigingsvenster vol

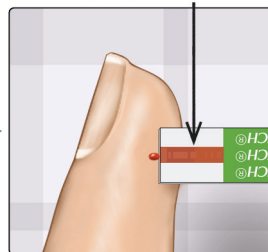


Houd de teststrip zodanig dat het smalle kanaaltje aan de rand van de teststrip de rand van de bloeddruppel net raakt.

De bloeddruppel wordt in het smalle kanaaltje gezogen en het bevestigingsvenster moet zich helemaal vullen.

3

## Bekijk het resultaat

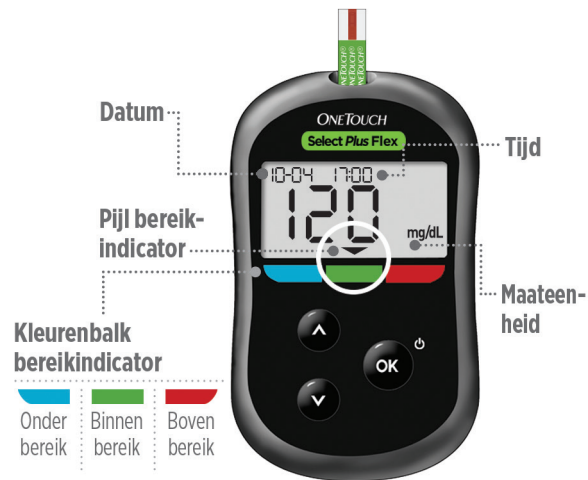

Voorbeeld van een meetwaarde binnen bereik

De meetwaarde verschijnt op het beeldscherm. De pijl van de bereikindicator wijst naar de blauwe, groene of rode kleurenbalk van de bereikindicator en laat u zo weten of uw resultaat onder, binnen of boven uw bereik ligt.



Voorbeeld van een meetwaarde onder bereik



Voorbeeld van een meetwaarde boven bereik


4


## Optioneel: Verbinding maken met een mobiel apparaat


Uw meter beschikt over **Bluetooth®**-technologie. Hiermee kunt u de meetwaarden draadloos naar een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet sturen en ze daar aflezen of in een grafiek uitzetten. Voor meer informatie over de draadloze functie van uw meter en om een volledige lijst met compatibele apparaten en softwaretoepassingen te zien, kunt u naar [www.OneTouch.be](http://www.OneTouch.be) gaan.

### Verbinding maken met de meter

Druk tegelijkertijd op **OK** en **^** om de **Bluetooth®**-functie in en uit te schakelen. Voer de op de meter weergegeven PIN in op het mobiele apparaat als het mobiele apparaat daarom vraagt.

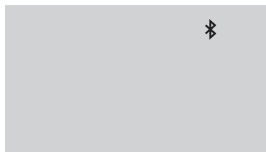

Het symbool  betekent dat de **Bluetooth®**-functie is ingeschakeld.

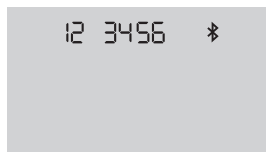


Voorbeeld van een PIN-nummer.

### Symbolen op de meter


	Stroom meter		<b>Bluetooth®</b> ingeschakeld
	Batterij bijna leeg		Geschiedenismodus (eerdere resultaten)
	Batterij leeg		Druppel aanbrengen
	Controle vloeistof		Pijl bereikindicator
	Synchroniseren	<b>SET</b>	Instellingsmodus

## Over de bereikindicator

Uw meter heeft een bereikindicator die u automatisch laat weten of uw resultaat onder, boven of binnen uw bereik ligt. De boven- en ondergrenzen van het bereik die de bereikindicator gebruikt, zijn als volgt vooraf ingesteld:

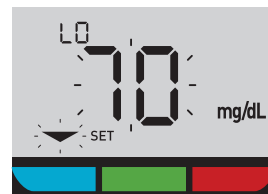

Vooraf ingestelde ondergrens van het bereik

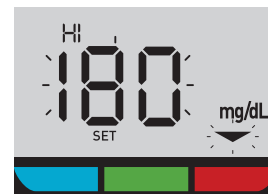

Vooraf ingestelde bovengrens van het bereik

Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor meer informatie over het naar uw behoeften wijzigen van de vooraf ingestelde bereiksgrenzen.

Het **Bluetooth®**-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik door LifeScan Scotland Ltd. van dergelijke merken valt onder de licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Vervaardigd door:  
LifeScan Europe GmbH  
Dammstrasse 19  
6300 Zug  
Zwitserland

OneTouch®  
Revisiedatum: 08/2023  
© 2018-2023 LifeScan IP Holdings, LLC  
AW 07305201A

Contacteer de OneTouch® Klantendienst op  
0800 15 325 (België) of [contact@OneTouch.be](mailto:contact@OneTouch.be)  
of bezoek onze website [www.OneTouch.be](http://www.OneTouch.be).

**EC REP** LifeScan Deutschland GmbH  
Niederkaßeler Lohweg 18  
40547 Duesseldorf, Germany

**Lifescan**

