

Nature Care Bamboe pleister

MEDISCH HULPMIDDEL

Algemene productbeschrijving

De bamboepleister is samengesteld uit rugmateriaal, absorberend kussen en release-papier dat voor gebruik moet worden verwijderd. Het rugmateriaal is vervaardigd uit 100% bamboevezel en gecoat met medische drukgevoelige kleefstof. Het absorberende kussen is vervaardigd uit 100% non-woven bamboevezel. Het release-papier is glassine-papier. Het product is latexvrij. Het behoort tot medisch hulpmiddel klasse I (niet-steriel).

Beoogd gebruik

Niet-steriele pleister voor eenmalig gebruik is toepasbaar op kleine oppervlakkige wonden, schaafwonden en snijwonden

. Het product is bestemd voor menselijke toepassing, zonder beperkingen (in leeftijdsgroep, gewichtsklasse, gezondheidstoestand of conditie), voor gebruik door zorgprofessionals en leken.

Toepassing/indicatie

De bamboepleister is toepasbaar op kleine oppervlakkige wonden, schaafwonden en snijwonden, en kan gebruikt worden voor alle leeftijdsgroepen.

Catalogusnummers

Verpakking	Beschrijving	Lengte	Ref.-nr.
P20	Bamboo Plaster eco-friendly MIX LG1	(8) 25mm x 72mm (6) 30mm x 40mm (6) 40mm x 60mm	500 601
P20	Bamboo Plaster eco-friendly MIX LG2	(8) 25mm x 72mm (6) 30mm x 40mm (6) 40mm x 60mm	500 602
P20	Bamboo Plaster eco-friendly MIX LG3	(8) 25mm x 72mm (6) 30mm x 40mm (6) 40mm x 60mm	500 603
P3	Bamboo Plaster Eco MIX zakje LG1	(1) 25mm x 72mm (1) 30mm x 40mm (1) 40mm x 60mm	500 611
P3	Bamboo Plaster Eco MIX zakje LG2	(1) 25mm x 72mm (1) 30mm x 40mm (1) 40mm x 60mm	500 622
P3	Bamboo Plaster Eco MIX zakje LG3	(1) 25mm x 72mm (1) 30mm x 40mm (1) 40mm x 60mm	500 633

Contra-indicaties en waarschuwingen

Niet gebruiken voor kleine en diepe wonden, wonden van dierenbeten, diverse huidzweren, steekwonden van ijzeren nagels of messen. Ook niet voor wonden met vreemde voorwerpen op het oppervlak, geschroeiide en etterende wonden, gecontamineerde of geïnfecteerde wonden. Het product is wegwerpbaar en kan niet opnieuw worden gebruikt. De gebruiksduur dient minder dan 24 uur te zijn. Weghouden van direct zonlicht en droog bewaren.

Nature Care Bamboo pleister

Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Het hergebruiken van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het herverwerken van hulpmiddelen om ze opnieuw te kunnen gebruiken kan leiden tot ernstige beschadigingen en een sterk verminderde werking. Informatie beschikbaar op verzoek.

Verwijdering van het product

Om het risico op infecties of milieuvervuiling tot een minimum te beperken, moeten bij het weggooien van wegwerpbare delen van de bamboepleister de verwijderingsprocedures worden gevolgd in overeenstemming met de van toepassing zijnde lokale wet- en regelgeving, voorschriften en infectiepreventiestandaarden. De bamboepleister mag samen met huisvuil worden afgevoerd of verbrand mits inachtneming van de plaatselijke officiële voorschriften.

Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese Unie en in landen met een vergelijkbaar wetstelsel (Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen); als tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is voorgevallen, meld dit dan bij de fabrikant en/of zijn gemachtigde en bij de betreffende nationale instantie.

Materiaaleigenschappen

Item	Testitem	
Absorberend kussen	Bestanddelen	100% bamboevezel
	gewicht (g/m ²)	130±20
	absorptie (g/g)	≥5
	zinktijd(en)	≤60
	zuurtegraad en alkaliteit	Neutraal
	fluorescentie	er mag geen sterke blauwe kleur zichtbaar zijn
basisweefsel	Bestanddelen	100% bamboevezel
	gewicht (g/m ²)	125±10
kleeflaag	Bestanddelen	Acrylaat
	gewicht van de kleeflaag (g/m ²)	60±10
release-papier	gewicht (g/m ²)	60±5
	fluorescentie	er mag geen sterke blauwe kleur zichtbaar zijn

Nature Care Bamboo pleister

zakje	Bestanddelen	Papier met koude verzegeling
	gewicht (g/m ²)	40±5

Etikettering

Partijnr. met 9-cijferige code

bijv.:



0

12

XXXXXX

jaar

week van
productie

alleen bestemd voor interne doeleinden

Productiedatum

bijv.:



2022

09

01

dag-
maand-
jaardag-maand-
jaardag-
maand-
jaar

Vervaldatum

bijv.:



2025

09

01

dag-
maand-
jaardag-maand-
jaardag-
maand-
jaar

Houdbaarheid: 3 jaar

Medisch hulpmiddel



Unieke hulpmiddelidentificatie



Wettelijke fabrikant



Allmed Medical Products Co.,Ltd

No.18 Qixing Road, Majiadian Town, 443200 Zhijiang City, Hubei Province, China

EC-REP



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Duitsland

Technische specificaties

Nature Care Bamboo pleister

Invoerder



PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 HEIDENHEIM; DUITSLAND
www.hartmann.info

Revisiedatum van de tekst: 17-8-2022