

Enregistrez votre lecteur pour bénéficier d'une assistance : fr.OneTouch.be/bienvenue



Guide de prise en main simplifié

Système de surveillance de la glycémie

OneTouch Select Plus Flex®

Suivez les étapes détaillées de ce guide pour la première prise en main de votre lecteur de glycémie.



⚠ IMPORTANT : Veuillez lire le manuel d'utilisation fourni avec le lecteur de glycémie.



AW 07305301B

ONETOUCH®

1

Réglage de la date et de l'heure du lecteur

Allumez le lecteur

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran de démarrage apparaisse.

Utilisez les boutons pour le réglage des différents paramètres et appuyez sur pour confirmer la saisie.

Réglage de l'heure sur le premier écran SET

- > L'heure clignote. Appuyez sur si l'affichage est exact ou modifiez au besoin et confirmez.
- > Les minutes clignent. Appuyez sur si l'affichage est exact ou modifiez au besoin et confirmez.

Réglage de la date sur l'écran SET suivant

- > L'année clignote. Appuyez sur si l'affichage est exact ou modifiez au besoin et confirmez.
- > Le mois clignote. Appuyez sur si l'affichage est exact ou modifiez au besoin et confirmez.
- > Le jour clignote. Appuyez sur si l'affichage est exact ou modifiez au besoin et confirmez.

Paramétrage terminé

La configuration du lecteur est terminée lorsque l'écran affiche 3 tirets.



2

Réalisation d'un test

Zone de contact




L'icône représentant une goutte de sang clignote.

Fente d'insertion destinée aux bandelettes réactives


Insérez une bandelette réactive dans la fente d'insertion de la bandelette réactive avec la zone de contact vous faisant face.

Sillon étroit

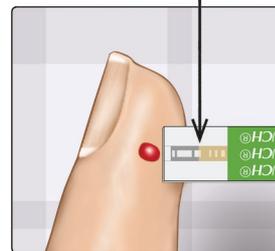

Alignez la bandelette réactive sur la goutte de sang, de sorte que le sillon étroit situé à l'extrémité de la bandelette réactive touche légèrement la goutte de sang.

Fenêtre de confirmation remplie

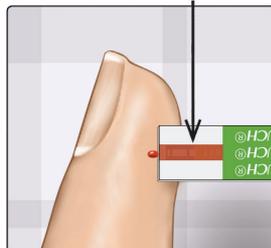

La goutte de sang est aspirée dans le sillon étroit et la fenêtre de confirmation doit être complètement remplie.

3

Affichage du résultat



Exemple de résultat dans l'objectif

Le résultat s'affiche à l'écran. L'indicateur d'objectif apparaît au-dessus de l'échelle de couleur, indiquant si le résultat se trouve dans la plage cible ou en dessous/au-dessus des seuils définis.



Exemple de résultat inférieur à l'objectif



Exemple de résultat supérieur à l'objectif

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
4

Facultatif : Connexion à un périphérique mobile

Votre lecteur est équipé de la technologie **Bluetooth®**. Celle-ci permet la transmission sans-fil des résultats vers un périphérique mobile, tel qu'un téléphone portable ou une tablette tactile, à des fins d'affichage et de suivi. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonction sans-fil du lecteur et obtenir la liste complète des terminaux et applications logicielles compatibles, consultez notre site à l'adresse www.OneTouch.be ou www.OneTouch.lu.

Connexion du lecteur

Appuyez simultanément sur les boutons **OK** et **▲** pour activer ou désactiver la fonction **Bluetooth®**. À l'invite du périphérique mobile, saisissez le code PIN affiché sur le lecteur sur le périphérique.



Le symbole  indique que la fonction **Bluetooth®** est activée.




Exemple de code PIN.

Symboles sur le lecteur


	Alimentation du lecteur		Fonction Bluetooth® activée
	Pile faible		Mode Historique (anciens résultats)
	Pile déchargée		Appliquer l'échantillon
	Solution de contrôle		Flèche d'indicateur d'objectif
	Synchronisation		Mode de configuration

À propos de l'indicateur d'objectif

Le lecteur est équipé d'un indicateur d'objectif qui vous indique automatiquement si le résultat relevé se situe en dessous, au-dessus ou dans la limite des seuils de glycémie définis. Les seuils d'objectif inférieur et supérieur utilisés par l'indicateur d'objectif sont préréglés comme suit :

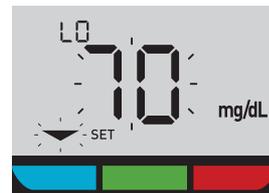

Préréglage du seuil d'objectif inférieur

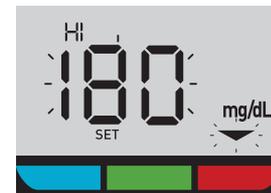

Préréglage du seuil d'objectif supérieur

Pour obtenir des informations détaillées sur la modification des seuils d'objectif inférieur et supérieur en fonction de vos propres besoins, reportez-vous au manuel d'utilisation du système.

La typographie et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par LifeScan Scotland Ltd. Les autres noms de marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Fabriqué par :
LifeScan Europe GmbH
Dammstrasse 19
6300 Zug
Switzerland

OneTouch®
Date rév. : 09/2023
© 2018–2023 LifeScan IP Holdings, LLC
AW 07305301B

Contactez le Service à la Clientèle OneTouch® au 0800 14660 (BE) ou 800 25749 (LU) ou contact@onetouch.be ou visitez notre site web www.OneTouch.be ou www.OneTouch.lu.

EC REP LifeScan Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 18
40547 Duesseldorf, Germany

Lifescan

