

HYAL⁴

Silverspray


EEN GEMAKKELIJK AAN TE BRENGEN SPRAY DIE HELPT BIJ DE WONDGENEZING EN BESCHERMT TEGEN MICROBIËLE PENETRATIE.¹⁻³



Dit product is een medisch hulpmiddel (CE 0051)


HYALURONZUUR

- Voornaamste bestanddeel (Hyaluronzuur met 200 kDA molecuulmassa)
- Creëert een vochtige micro-omgeving die de spontane weefselregeneratie bevordert³

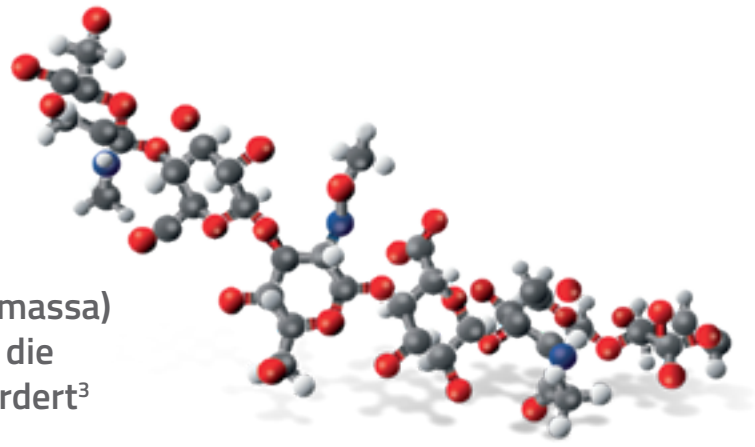

METALLISCH ZILVER³


Opgenomen in de matrix gecreëerd door kaolien en zetmeel.

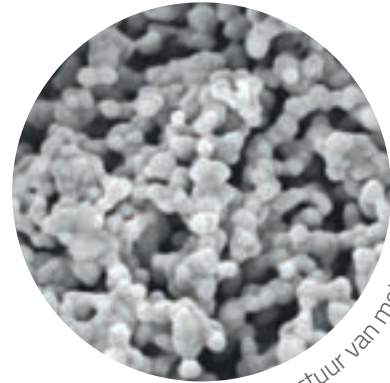

3D microstructuur van metallisch zilver

VITAMINE E^{3,4}

Dankzij zijn antioxiderende en filmvormende werking ondersteunt het de hydraterende werking van hyaluronzuur en ondersteunt zo het regeneratieproces van de huid.

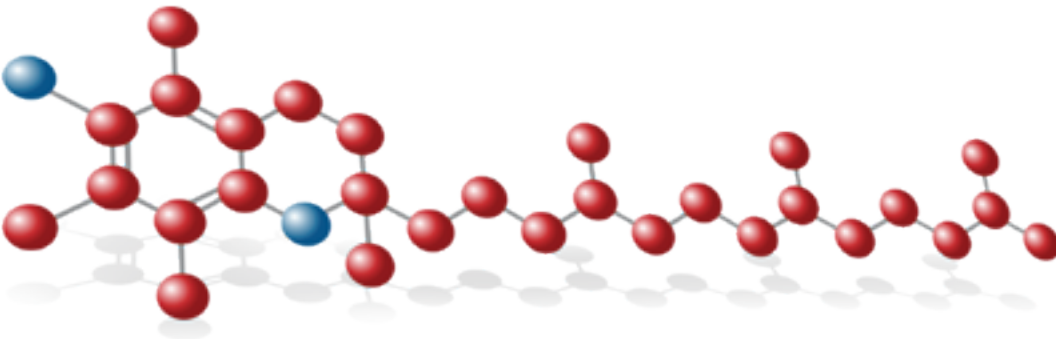

KAOLIEN EN MAÏSZETMEEL^{3,5}

- Hyaluronzuur en zilver worden gecombineerd in een matrix (kaolien en maïszetmeel) met absorberende eigenschappen. De absorptie van het exsudaat creëert een omgeving die het natuurlijke weefselregeneratieproces vergemakkelijkt en vormt samen met hyaluronzuur en zilver een beschermende barrière tegen microbiële penetratie.³
- Kaolien is aluminiumsilicaat dat de bloedstolling kan induceren en versnellen door de snelle absorptie van het watergehalte van bloed op de bloedingsplaats.⁵

Indicaties

- Behandeling van niet geïnfecteerde huidletsels, bij diabetische voet, voetschimmel en doorligwonden.



Samenstelling

- Hyaluronzuur natriumzout 0,25%
- Ag (Metallisch zilver)
- Vitamine E
- Andere: kaolien, maïszetmeel, rijstzemelenolie, terpineol, disiloxaan en drijfgas

Presentatie

- Spray 50 ml
- Spray 125 ml

Kenmerken

Verpakkings-grootte	CNK Code	Publieks-prijs
Spray 50 ml	4323-440	€ 13,25
Spray 125 ml	4323-457	€ 19,45


Voordelen van de nieuwe formule

- De spraypoeder-suspensie hecht zich zonder dispersie aan het wondbed en vormt een beschermende barrière tegen bacteriën.
- Absorbeert wondvocht.

Gebruiksaanwijzing³


AFBEELDING 1:

Reinig de wonde met
bijv. een fysiologische
oplossing.

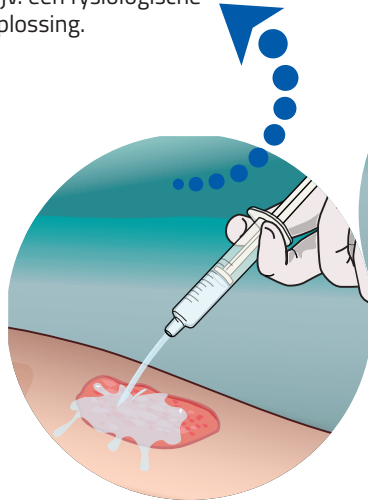


AFBEELDING 2:

Schud de spuitbus goed
gedurende enkele seconden
voor gebruik.

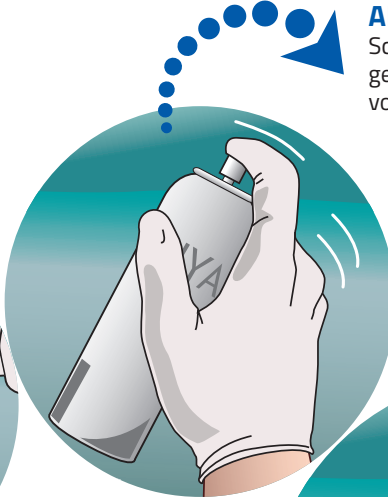


AFBEELDING 3:

Houd de spuitbus in een verticale
positie en spuit vanop een afstand
van ongeveer 15 cm genoeg
poeder om het te behandelen
oppervlak te bedekken.

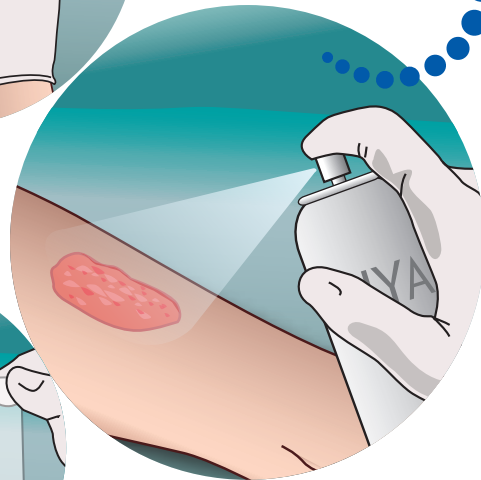


AFBEELDING 4:

Het wordt aangeraden om het
behandelde gebied met steriel
gaas af te dekken.

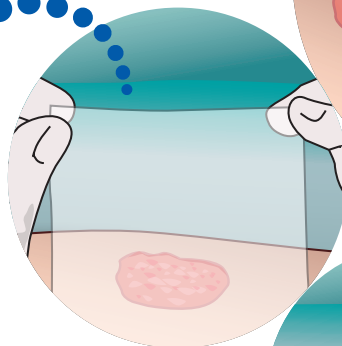

AFBEELDING 5:

Breng een zwachtel aan. Gebruik Hyalo4[®]
Silver Spray één of twee keer per dag,
afhankelijk van de ernst van de wonde.

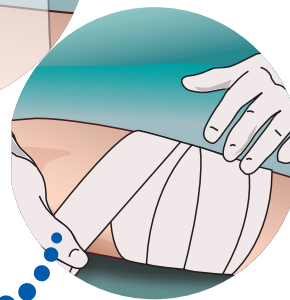

- Het product is gemakkelijk te verwijderen door het letsel te reinigen met fysiologische zoutoplossing.

1. Prosdocimi M., & Bevilacqua C. (2012) Exogenous hyaluronic acid and wound healing: an updated vision. *Panminerva Med* 54 (2), 129-135.

2. Chen, W.Y.J., & Abatangelo, G. (1999). Functions of hyaluronan in wound repair. *Wound Rep Reg.* 7, 79-89.

3. Hyalo4 Silverspray. Instructies voor gebruik. Data on file.

4. Shahrim Z., et al. (2016). Palm Tocotrienol: A Good Antioxidant for Skin Wound Healing. *Palm Oil Developments* 64,14-19.

5. Elsabahy M., & Hamad, M., A. (2021). Design and Preclinical Evaluation of Chitosan/Kaolin Nanocomposites with Enhanced Hemostatic Efficiency. *Mar. Drugs*, 19 (50), 1-16.