


Laten we beginnen

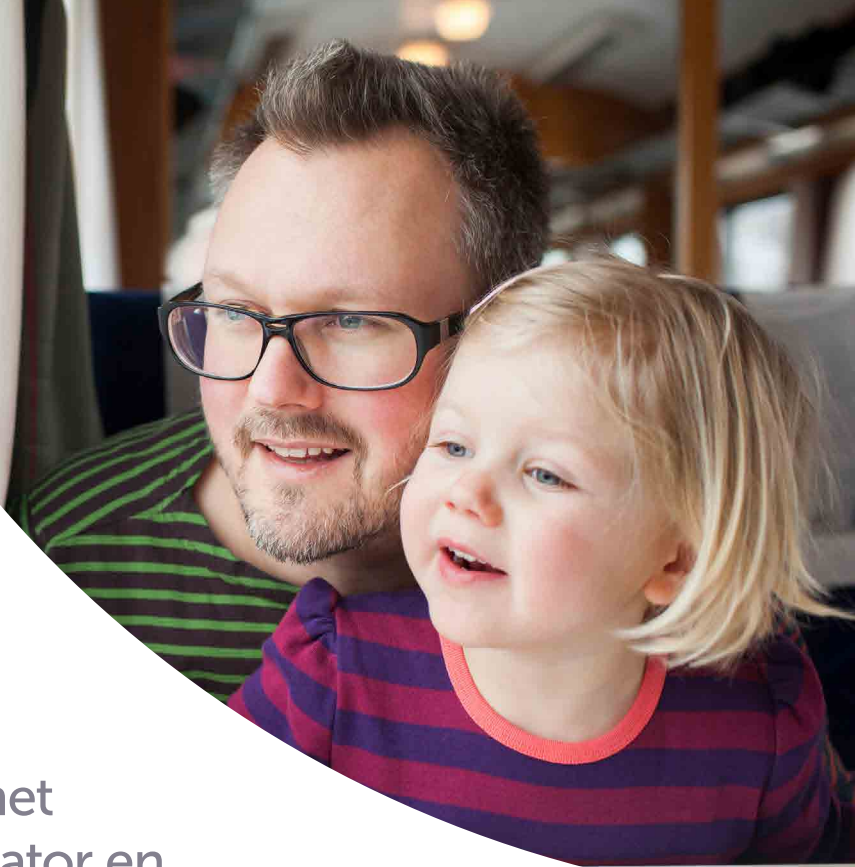

De OneTouch Verio®
meter is de eerste meter met
automatische kleurenindicator en
voortgangsnotities*

...met eenvoudig testen in 2 stappen



Stap 1: Plaats een
OneTouch Verio®
teststrip in de meter

+



Stap 2: Breng uw
bloeddruppel aan
op een zijde van de
teststrip

=



En dat is alles. Uw resultaten verschijnen
op het scherm met een gekleurde stip
die aangeeft of het resultaat uitkomt
"binnen bereik" of niet*.

ColourSure™
TECHNOLOGY

ONETOUCH®
every touch is a step forward™


* De onder- en bovengrenswaarden die worden ingesteld in de OneTouch Verio® meter worden toegepast op alle glucosemetingen. De waarden gelden dus ook voor tests die worden afgenomen voor of na de maaltijd, voor of na het innemen van geneesmiddelen en rond alle andere activiteiten die de bloedglucose kunnen beïnvloeden. Patiënten worden aangeraden zich te informeren bij hun zorgverlener over de onder- en bovengrenswaarden

Het OneTouch® Delica® prikstelsysteem

U heeft een OneTouch® Delica® prikpen ontvangen samen met uw OneTouch Verio® meter. Lancetten zijn steriel en voor eenmalig gebruik. Volg onderstaande stappen om een bloeddruppel uit uw vinger af te nemen.


Om infectiegevaar en ziektes die verspreid worden door bloed te voorkomen, was uw handen grondig met warm water en zeep voordat u een test uitvoert. Spoel en droog goed af.

1

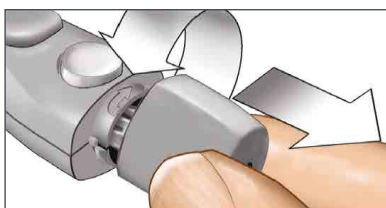


Verwijder de dop van de OneTouch® Delica® prikpen door tegen de klok in te draaien en plaats een steriel lancet totdat dit op zijn plaats klikt.

2

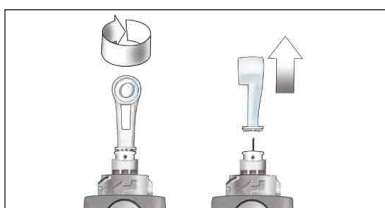

Draai de beschermdop één keer helemaal rond totdat deze loskomt van het lancet. Bewaar de beschermdop - deze hebt u nog nodig om het lancet te verwijderen en weg te gooien. Draai niet te stevig aan.

3

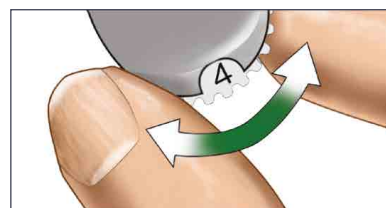

Stel de diepte in van 1 tot 7 (1 is het minst diep, 7 is het diepst). Een ondiepe vingerprik kan minder pijnlijk zijn. Probeer eerst een ondiepe instelling en verhoog tot u een instelling vindt die u een voldoende grote bloeddruppel geeft.

4



Schuif het spanningsmechanisme naar achteren tot u een klik hoort. Span niet te stevig aan.

5



Plaats een teststrip met de gouden zijde van de strip en de teststripuiteinden naar u toe gericht in de teststripport. Wanneer het scherm "bloed opbrengen" verschijnt, kunt u uw bloeddruppel aanbrengen op de teststrip.

6



Houd de prikpen stevig tegen de zijkant van uw vinger. Druk op de ontspanknop.

Het gebruikte lancet en de gebruikte teststrip wegwerpen: Wees na ieder gebruik voorzichtig bij het weggoien van het gebruikte lancet om te voorkomen dat u zich per ongeluk aan de naald prikt. Gebruikte lancetten en teststrips worden in bepaalde gebieden beschouwd als biologisch gevaarlijk afval. Neem voor het weggoien hiervan de aanwijzingen van uw arts/ diabetesverpleegkundige of de plaatselijke voorschriften in acht.

Was uw handen grondig met water en zeep nadat u de meter, de teststrips, de prikpen en het dopje hebt gebruikt.

Voordat u de OneTouch Verio® meter en de OneTouch® Delica® prikpen gebruikt om uw bloed te testen, lees zorgvuldig de handleiding en de bijsluiters die met uw systeem meegeleverd worden.

Individuele training en ondersteuning zijn beschikbaar via de OneTouch® klantendienst als u uw OneTouch® meter registreert.



Bezoek www.OneTouch.be



Bel gratis naar de OneTouch® klantendienst op 0800 15325

Lijnen open van maandag tot vrijdag van 9u - 17u