

Zachte injectie en handig in gebruik

Accu-Fine® pennaalden te gebruiken met de meest courante insulinepennen.



Er zijn verschillende lengtes Accu-Fine[®] pennaalden beschikbaar:

De Accu-Fine pennaalden maken een zachte injectie mogelijk en zijn veilig en handig in gebruik.

GOED OM TE WETEN

Standaardlengte van de naald

Een naald van 4 - 5 mm lang is doorgaans voldoende, op voorwaarde dat de injectie op een correcte manier en verticaal (in een hoek van 90°) wordt toegediend en de 10 seconden-regel wordt toegepast.

Langere naald

Een injectie in een hoek van 45° kan worden toegediend mits gebruik van een naald (van ten minste 8 mm) en het vormen van een vouw in de huid.

Ook de diameter van de naald is belangrijk

- Hoe lager het kalibernummer (G), hoe groter de diameter van de naald en hoe groter de insulinstroom.
- Hoe hoger het kalibernummer (G), hoe kleiner de diameter van de naald en hoe kleiner de insulinstroom.

Te gebruiken met de meest courante insulinepennen

Lengte van de naald	CNK	Aanbevolen publieke prijs (6% BTW incl.)	Compatibiliteit
32G x 4 mm	3682-127	19,20 EUR	Sanofi (ClikSTAR, SoloSTAR, Lyxumia Pen, JuniorSTAR) Lilly (KwikPen, HumaPen Memoir, HumaPen, Sawio, HumaPen Luxura, HumaPen Luxura HD, Forsteo)
31G x 5 mm	3682-416	19,30 EUR	Novo Nordisk (FlexPen, NovoPen 3, NovoPen Junior, NovoPen 4, NovoPen Echo, Victoza Pen, InnoLet, FlexTouch)
31G x 6 mm	3682-432	18,55 EUR	AstraZeneca (Byetta 5 mcg, Byetta 10 mcg) Ypsomed (Ypsopen)
31G x 8 mm	3682-424	18,55 EUR	Owen Mumford (Autopen Classic, Autopen 24) Berlin (Chemie BerliPen Areo)



Surf naar www.accu-chek.be



Bel de Accu-Chek[®] Service **0800 93 626**



Volg ons op Facebook www.facebook.com/accuchekbe



Bekijk de video's op www.youtube.com/AccuChekBelgium

ACCU-CHEK en ACCU-FINE zijn handelsmerken van Roche. Alle andere merknamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
© 2017 Roche Diabetes Care

Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeekle 198
1800 VILVOORDE

ACCUCHEK[®]