

# Pansement en bambou Nature Care

## DISPOSITIF MÉDICAL

### Description générale du produit

Le pansement en bambou est composé d'un matériau de support, d'une compresse absorbante et d'une couche de papier antiadhésif, à retirer avant utilisation. Le matériau de support est composé à 100 % de fibre de bambou et est recouvert d'un adhésif médical sensible à la pression. La compresse absorbante est composée à 100 % de tissu de bambou. La couche de papier antiadhésif est composée de papier cristal. Le produit est exempt de latex. Il s'agit d'un dispositif médical de classe I (non stérile).

### Utilisation prévue

Le pansement adhésif à usage unique non stérile est destiné à être appliqué sur les petites plaies, abrasions et coupures superficielles.

Le produit est destiné aux humains, sans restrictions en termes d'âge, de poids, d'état de santé ni de pathologie, et peut être appliqué par les utilisateurs profanes et les professionnels de la santé.

### Application/indication

Le pansement en bambou est destiné à être appliqué sur les petites plaies, abrasions et coupures superficielles et peut être utilisé dans tous les groupes d'âge.

### Numéros de référence

Conditionnement	Description	Longueur	Réf n°
P20	Pansement en bambou respectueux de l'environnement MIX LG1	(8) 25 mm x 72 mm (6) 30 mm x 40 mm (6) 40 mm x 60 mm	500 601
P20	Pansement en bambou respectueux de l'environnement MIX LG2	(8) 25 mm x 72 mm (6) 30 mm x 40 mm (6) 40 mm x 60 mm	500 602
P20	Pansement en bambou respectueux de l'environnement MIX LG3	(8) 25 mm x 72 mm (6) 30 mm x 40 mm (6) 40 mm x 60 mm	500 603
P3	Paquet de pansements en bambou Eco MIX LG1	(1) 25 mm x 72 mm (1) 30 mm x 40 mm (1) 40 mm x 60 mm	500 611
P3	Paquet de pansements en bambou Eco MIX LG2	(1) 25 mm x 72 mm (1) 30 mm x 40 mm (1) 40 mm x 60 mm	500 622
P3	Paquet de pansements en bambou Eco MIX LG3	(1) 25 mm x 72 mm (1) 30 mm x 40 mm (1) 40 mm x 60 mm	500 633

### Contre-indications et avertissements

Ne pas utiliser en cas de petites plaies profondes, de morsure d'animal, de furoncle, ni de plaie causée par un clou ou un couteau. Ne pas non plus utiliser en présence de plaies présentant des corps étrangers en surface, de plaies échaudées et suppurantes, ni de plaies contaminées ou infectées. Le produit est jettable et ne peut pas être réutilisé. La durée d'utilisation doit être inférieure à 24 heures. Maintenir le produit à l'écart des rayons du soleil et de l'humidité.

# Pansement en bambou Nature Care

## Dispositif à usage unique

La réutilisation d'un dispositif médical à usage unique est dangereuse. Le retraitement des dispositifs en vue de leur réutilisation peut gravement nuire à leur intégrité et à leurs performances. Informations disponibles sur demande.

## Élimination du produit

Afin de minimiser le risque d'infections potentielles ou de pollution environnementale, les composants jetables du pansement en bambou doivent être mis au rebut conformément aux procédures d'élimination stipulées dans les lois, règlements, réglementations et normes de préventions des infections locales et en vigueur. Le pansement en bambou peut être mis au rebut ou incinéré avec les déchets ménagers, sous réserve de respect des réglementations officielles locales.

## Déclaration d'incident

Pour un patient/utilisateur/tiers situé dans l'Union européenne ou dans des pays disposant de réglementations identiques (Règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux) ; si, au cours de l'utilisation de ce dispositif ou en conséquence de son utilisation, un incident grave est survenu, veuillez déclarer celui-ci au fabricant et/ou son représentant autorisé, ainsi qu'à l'autorité de votre pays.

## Caractéristiques physiques

Document	Élément de test	
Compresse absorbante	Composants :	100 % de fibre de bambou
	poids (g/m <sup>2</sup> )	130±20
	Absorption (g/g)	≥5
	temps d'enfoncement (s)	≤60
	acidité et alcalinité	Neutre
	fluorescence	aucune couleur bleu vif ne doit apparaître
tissu de base	Composants :	100 % de fibre de bambou
	poids (g/m <sup>2</sup> )	125±10
adhésif	Composants :	Acrylique
	poids du revêtement adhésif (g/m <sup>2</sup> )	60±10

# Pansement en bambou Nature Care

papier de protection	poids (g/m <sup>2</sup> )	60±5
	fluorescence	aucune couleur bleu vif ne doit apparaître
pochette	Composants :	Papier de fermeture hermétique froide
	poids (g/m <sup>2</sup> )	40±5

## Étiquetage

### N° de lot avec code à 9 caractères

p. ex. :



0

12

XXXXXX

année  
e

semaine de  
production

à des fins d'utilisation en interne uniquement

### Date de fabrication

p. ex. :



année

mois

jour

### Date de péremption

p. ex. :



année

mois

jour

Durée de conservation : 3 ans

### Dispositif médical



### Identificateur d'appareil unique



### Fabricant légal

No.18 Qixing Road, Majiadian Town, 443200 Zhijiang City, Hubei province, Chine

### EC-REP



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Allemagne

# Pansement en bambou Nature Care

Importateur



PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann-Straße 12  
89522 HEIDENHEIM; ALLEMAGNE  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

**Date de révision du texte : 17/08/2022**