

Mepilex® Border Lite

PANSEMENT HYDROMOUSSE ABSORBANT ET MINCE


- Minimise les traumatismes et la douleur
- Pour les plaies sèches à exsudatives
- Auto-adhésif: ne nécessite pas de fixation

Film externe en polyuréthane

- Perméable à l'air et la vapeur
- Imperméable
- Résistant aux bactéries et aux virus (>25nM)

Couche Safetac®

- Atraumatique lors du retrait
- N'adhère pas à la plaie
- Réduit le risque de macération

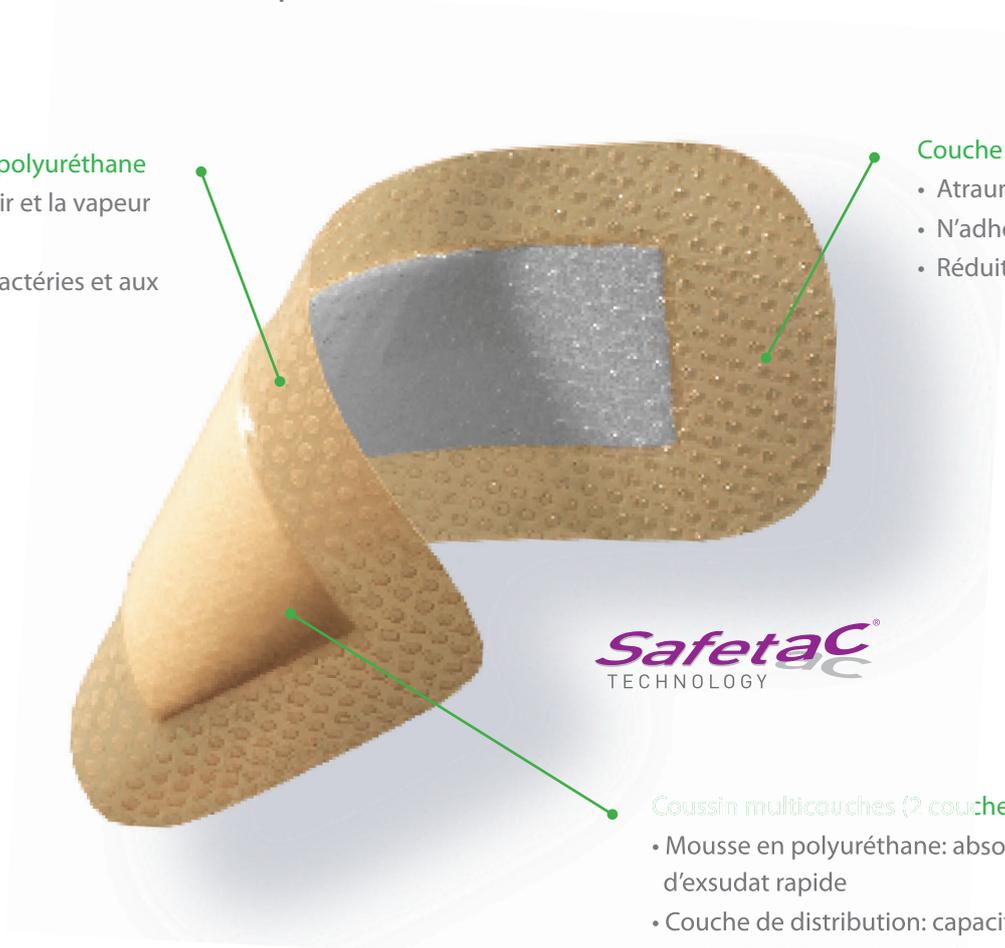


Coussin multicouches (2 couches)

- Mousse en polyuréthane: absorption d'exsudat rapide
- Couche de distribution: capacité optimale d'absorption et risque réduit de fuite et de macération


Technologie Safetac®

Safetac® est une technologie unique et brevetée qui minimise la douleur et le traumatisme pour le patient. La technologie Safetac® est disponible exclusivement sur les pansements de Mölnlycke Health Care, notamment les pansements Mepilex Border Post-Op, les pansements Mepilex, Mepitel, Mepiform et Mepitac.

Pour plus d'information, visitez www.safetac.com

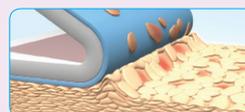

Les adhésifs traditionnels n'adhèrent que sur les crêtes de la peau, et doivent donc être plus fortement adhésifs pour rester en place.

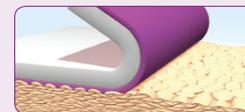


Safetac épouse les reliefs de la peau, scellant ainsi la plaie. En plus, le pansement n'adhère pas au lit de la plaie.

Mode d'emploi



1. Nettoyez la plaie.
Otez d'abord le film protecteur.

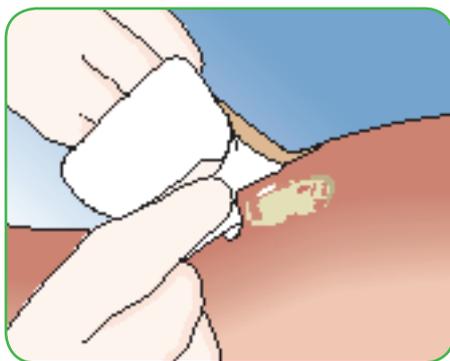

2. Appliquez la face adhésive sur la plaie.
Ne pas étirer.

Avantages

- Minimise les traumatismes et la douleur lors du retrait
- Minimise le risque de macération
- Auto-adhésif : application des plus aisées
- Fixation forte pour peaux sensibles
- Mince et confortable
- Adhère parfaitement aux zones difficiles d'accès telles que les pavillons auriculaires
- Peut être maintenu plusieurs jours sur la plaie dépendant de la condition de la plaie
- Permettant la douche

Indications

- Plaies sèches à exsudatives
- Plaies traumatiques telles que les abrasions, les coupures
- Lésions postopératoires
- Protection des peaux sensibles et/ou abîmées des nourrissons, des enfants et des personnes âgées
- Escarres

Mesures de précaution

En cas de signes cliniques d'infection, instaurer un traitement adéquat.



Mepilex Border Lite assortiment

Réf.	Dim. (cm)	Code CNK	Pcs/RET	Pcs/TRP
281000	4 x 5	2256-592	10	7x10
281100	5 x 12,5	2256-626	5	13x5
281200	7,5 x 7,5	2256-634	5	14x5
281300	10 x 10	2256-667	5	10x5
281500	15 x 15	2256-683	5	10x5

Plus d'info sur www.molnlycke.com/be-fr

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72/2, 2600 Berchem, Belgique. Tél +32 (0)3 286 89 50 - Fax +32 (0)3 286 89 52

Mölnlycke Health Care, Mepilex sont des marques et des logos déposés par la société Mölnlycke Health Care AB.
© 2010 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés.