



De OneTouch Reveal<sup>®</sup>  
mobiele app instellen  
met Android

ONETOUCH<sup>®</sup>


# Stap 1: De mobiele app downloaden

A




Zoek het Google Play icoon op uw Android toestel


B

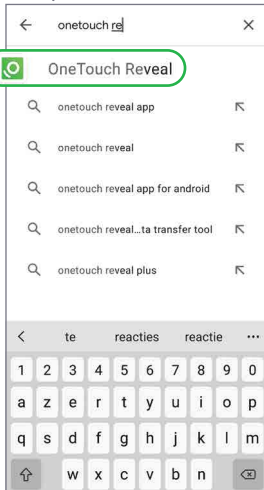


C

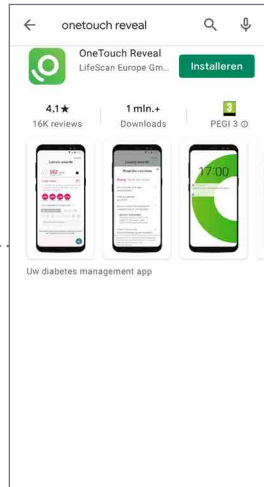

D

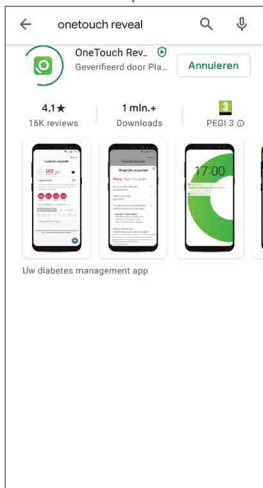

E

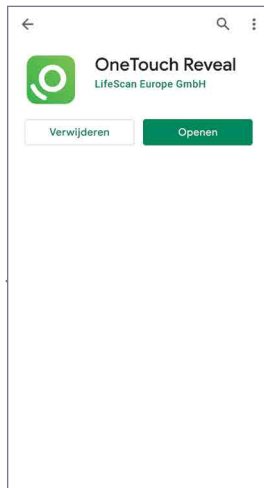

## Stap 2: Een OneTouch Reveal® account creëren

A

Volgende

**ONETOUCH Reveal®**

Selecteer een land

Waar woont u?

België

Algeria

Argentina

Brazil

Canada

Chile

Columbia

Česká republika

Deutschland

España

**OneTouch wil je berichten sturen**

Berichten kunnen bestaan uit meldingen, geluiden en symboolbadges. Dit kun je instellen in instellingen.

Sta niet toe    Sta toe

B

Volgende

**ONETOUCH Reveal®**

Selecteer een land

Waar woont u?

België

Algeria

Argentina

Brazil

Canada

Chile

Columbia

Česká republika

Deutschland

España

Om het meeste halen uit de OneTouch Reveal® app, selecteer **Sta toe**. De app zal u notificaties sturen.

C

Terug

**Ik ga akkoord**

**Toestemming om persoonlijke/gevoelige gegevens te verwerken**

De informatie die u verstrekt, zoals uw contactgegevens, uw gezondheidsgegevens met betrekking tot diabetesbeheer, evenals uw keuzes met betrekking tot het delen van uw gezondheidsgegevens, zal worden gebruikt door LifeScan, Inc., onze gelieerde bedrijven en onze dienstverleners voor uw registratie en deelname aan de OneTouch Reveal®-applicatie.

Wij kunnen de informatie voor deze doeleinden overdragen aan onze gelieerde bedrijven en dienstverleners in andere landen, met inbegrip van de Verenigde Staten, waar mogelijk andere gegevensbeschermingswetten gelden dan in het land waarin u woont. Ons [privacybeleid](#) bepaalt verder het gebruik van de informatie die u ons geeft.

U kunt uw toestemming zonder opgave van redenen op elk gewenst moment intrekken via Instellingen in de applicatie, of via de contactadressen in het deel Contact opnemen van ons [privacybeleid](#).

Door een vinkje te plaatsen in het vakje en de knop Ik ga akkoord te selecteren, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en ermee instemt. U geeft hiermee ook uitdrukkelijk toestemming om uw gezondheidsgegevens te verwerken voor de toegelichte doeleinden.

D

**ONETOUCH Reveal®**

Hebt u al een account? **Inloggen**

Geboortedatum

E-mailadres

E-mailadres bevestigen

Wachtwoord

Wachtwoord bevestigen

Kliniekcode (optioneel)

Ingelogd blijven

Door een account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en het marketingbeleid van LifeScan Belgium BVBA.

Ik wil graag per e-mail berichten krijgen over diabetes, marketingmateriaal en promotieaanbiedingen van LifeScan Belgium BVBA.

Door

**ONETOUCH Reveal®**

Hebt u al een account? **Inloggen**

15 november 1964 ✓

jwouters@email.com ✓

jwouters@email.com ✓

\*\*\*\*\* ✓

\*\*\*\*\* ✓

Kliniekcode (optioneel) ⓘ

Ingelogd blijven

Door een account aan te maken, bevestig ik dat ik de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid heb gelezen en begrepen en ermee akkoord ga en dat ik de leeftijd van 18.

Ik wil graag per e-mail berichten krijgen over diabetes, marketingmateriaal en promotieaanbiedingen van LifeScan Belgium BVBA.


**Doorgaan**

## Stap 3: De meter koppelen (Deel 1)



### BELANGRIJK


Zorg ervoor dat Bluetooth® aanstaat zowel op de meter als uw smartphone

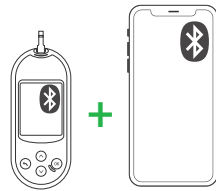

A



B

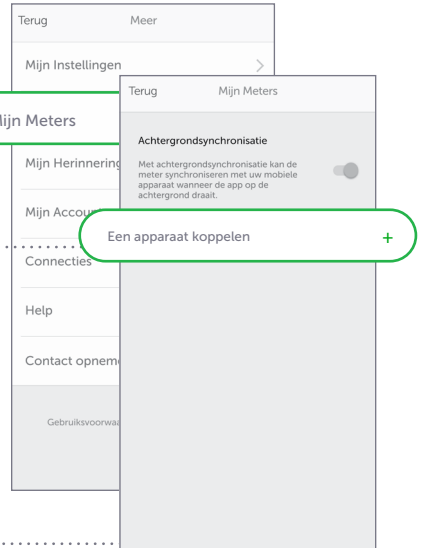


C



D



## Stap 3: De meter koppelen (Deel 2)

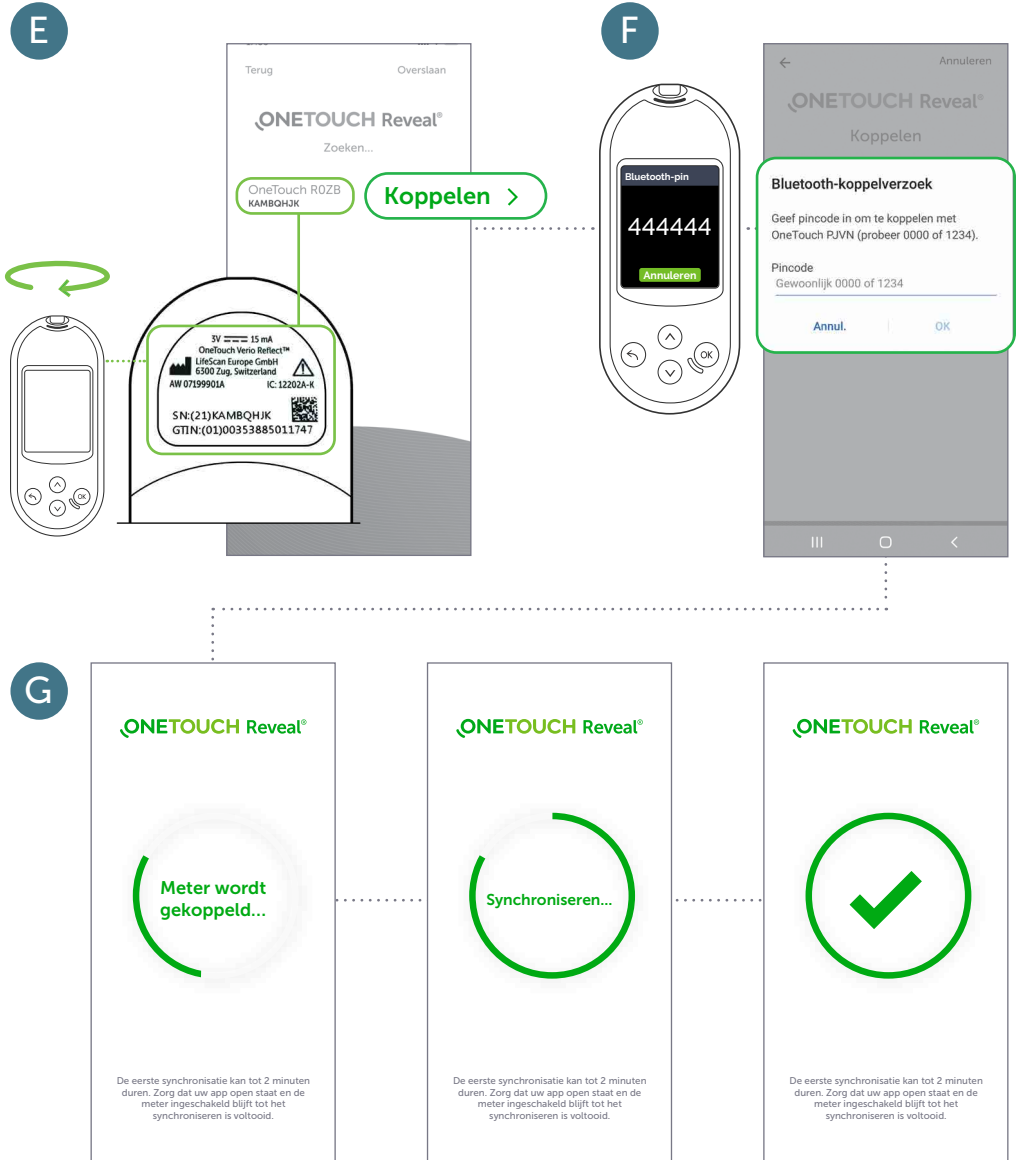


**Helemaal klaar!**

U kunt nu beginnen synchroniseren.


# Stap 4: Uw vooruitgang met uw professionele zorgverlener delen

## Optie 1: Gebruik de kliniecode van uw professionele zorgverlener

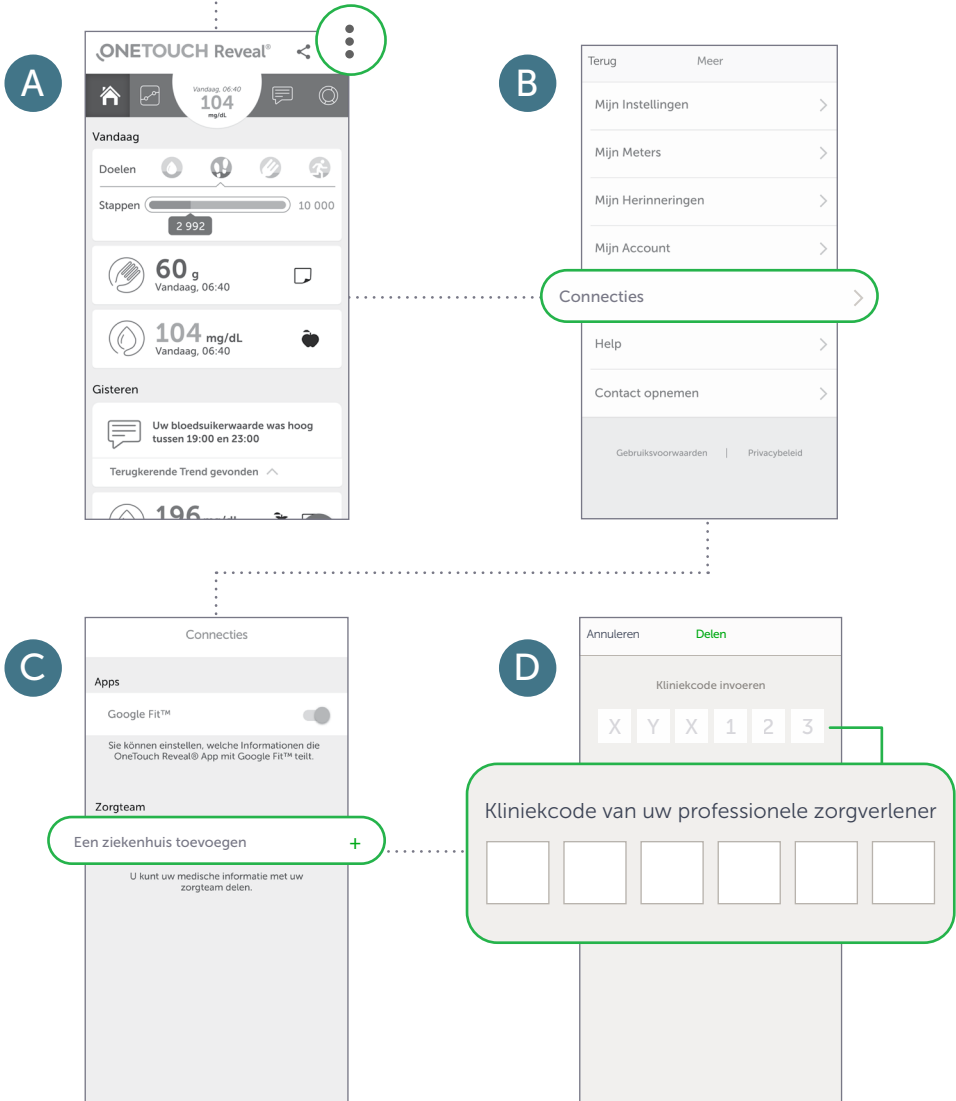

# Stap 4: Uw vooruitgang met uw professionele zorgverlener delen

## Optie 2: Een PDF rapport delen per e-mail

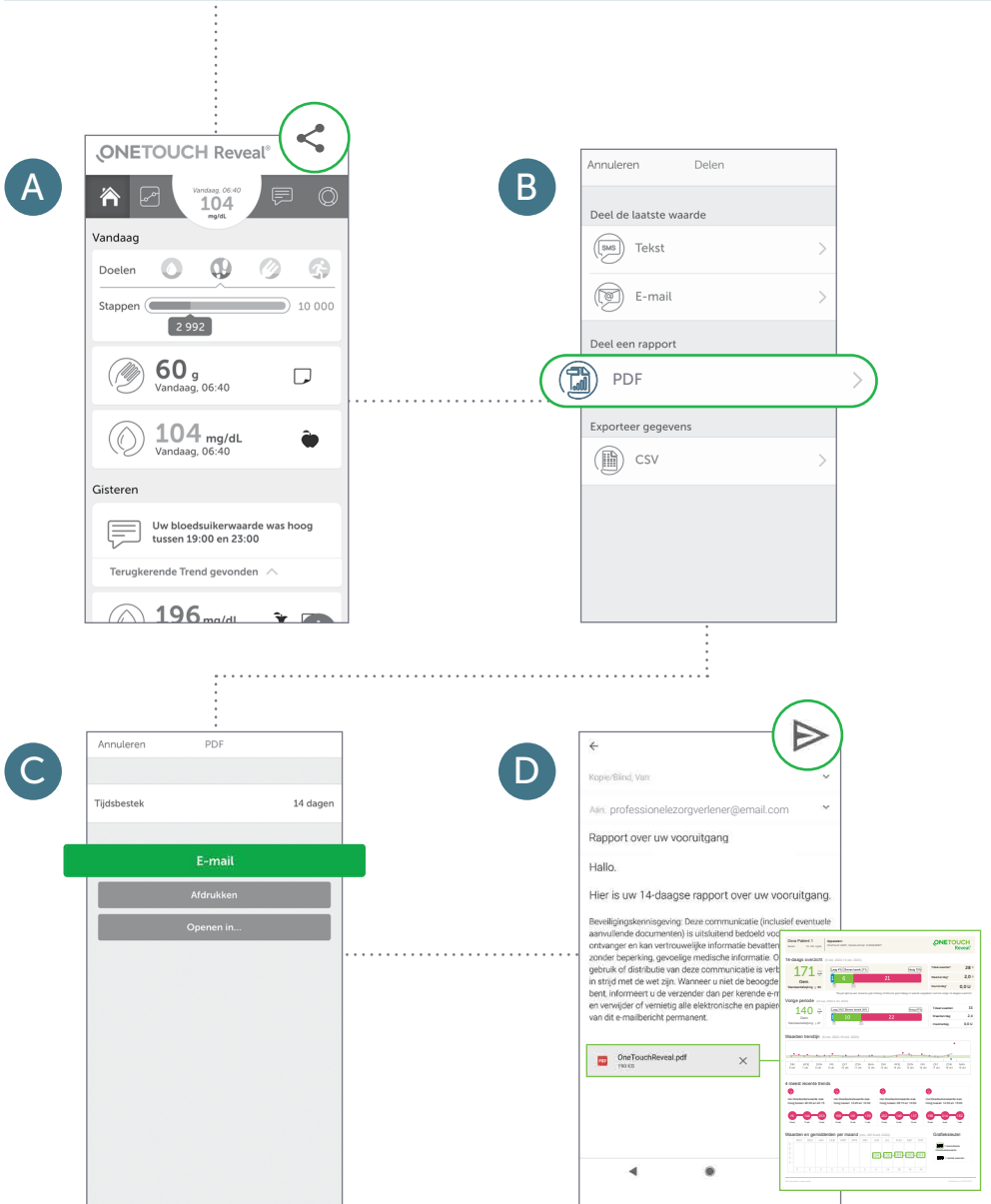

Kliniekcode van uw professionele zorgverlener



Contacteer de  
**OneTouch®** Klantendienst  
**0800 15325** (bel gratis)



**contact@OneTouch.be**



**www.OneTouch.be**  
**www.OneTouchReveal.be**

Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van deze merken door LifeScan Schotland is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars. Google Play en Google Play logo zijn trademarks van Google LLC

**ONETOUCH®**