

# Nature Care Cotton tape

## MEDISCH HULPMIDDEL

### Algemene productbeschrijving

Katoentape is samengesteld uit rugmateriaal en medische drukgevoelige kleefstof. Het rugmateriaal is vervaardigd uit 100% katoen en aan één zijde gecoat met medische drukgevoelige kleefstof. Dankzij zijn goed hechtende eigenschap wordt de katoentape gebruikt om medische hulpmiddelen of verbanden op bepaalde lichaamsdelen te bevestigen. Het product is latexvrij. Het behoort tot medisch hulpmiddel klasse I (niet-steriel).

### Beoogd gebruik

Medische tape wordt gebruikt om verband op wonden of andere medische hulpmiddelen op specifieke lichaamsdelen te fixeren. Het product is bestemd voor menselijke toepassing, zonder beperkingen (in leeftijdsgroep, gewichtsklasse, gezondheidstoestand of conditie), voor gebruik door zorgprofessionals en leken.

### Toepassing/indicatie

Voor de fixatie van medische hulpmiddelen, naalden, verbanden en gaasjes. Voor de fixatie van wonden na een operatie. Ter voorkoming van wrijving aan vingers en tenen.

### Catalogusnummers

Verpakking	Beschrijving	Lengte	Ref.-nr.
P1	Cotton Tape eco-friendly LG1	2,5 cm x 5 m	536 002
P1	Cotton Tape eco-friendly LG2	2,5 cm x 5 m	536 005
P1	Cotton Tape eco-friendly LG3	2,5 cm x 5 m	536 061

### Contra-indicaties en waarschuwingen

Mag alleen in direct contact komen met intacte huid. Niet rechtstreeks in contact brengen met het wondoppervlak, anders kan het bij het afpellen tot secundaire wondbeschadiging leiden. De gebruiksduur moet minder dan 24 uur zijn. Weghouden van direct zonlicht en droog bewaren.

### Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Het hergebruiken van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het herverwerken van hulpmiddelen om ze opnieuw te kunnen gebruiken kan leiden tot ernstige beschadigingen en een sterk verminderde werking. Informatie beschikbaar op verzoek.

### Verwijdering van het product

Om het risico op infecties of milieuvervuiling tot een minimum te beperken, moeten bij het weggooien van wegwerpbaar delen van de katoentape de verwijderingsprocedures worden gevolgd in overeenstemming met de van toepassing zijnde lokale wet- en regelgeving, voorschriften en infectiepreventiestandaarden. Katoentape mag samen met huisvuil worden afgevoerd of verbrand mits inachtneming van de plaatselijke officiële voorschriften.

### Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese Unie en in landen met een vergelijkbaar wetstelsel (Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen); als tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is voorgevallen, meld dit dan bij de fabrikant en/of zijn gemachtigde en bij de betreffende nationale instantie.

# Nature Care Cotton tape

## Materiaaleigenschappen

Item	Testitem	Beschrijving	
Witte zelfklevende katoentape	Basisweefsel	Materiaal	100% katoen
		Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	85±10
	Kleeflaag	Materiaal	Smeltlijm
		Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	50±10
		Pelsterkte (testmethode ASTM D3330)	≥1,0 N/1cm

## Etikettering

### Partijnr. met 9-cijferige code

bijv.:



0

jaar

12

week van  
productie

XXXXXX

alleen bestemd voor interne doeleinden

### Productiedatum

bijv.:



2022

dag-  
maand-  
jaar

09

dag-maand-  
jaar

01

dag-  
maand-  
jaar

### Vervaldatum

bijv.:



2025

dag-  
maand-  
jaar

09

dag-maand-  
jaar

01

dag-  
maand-  
jaar

Houdbaarheid: 3 jaar

### Medisch hulpmiddel



Technische specificaties

# Nature Care Cotton tape

Unieke hulpmiddelidentificatie



Wettelijke fabrikant



Allmed Medical Products Co.,Ltd  
No.18 Qixing Road, Majiadian Town, 443200 Zhijiang City, Hubei Province, China

EC-REP



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Duitsland

Invoerder



PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann-Straße 12  
89522 HEIDENHEIM; DUITSLAND  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

**Revisiedatum van de tekst:** 17-8-2022